

دستور استفاده از صندلی چرخدار مدل اطفال ۷۰۱۰:

الف) طریقه‌ی جمع و باز نمودن صندلی چرخدار:



- (۱) برای باز نمودن صندلی، مطابق شکل ۱ با ایستادن در کنار و بوسیله‌ی دو دست، لبه کناری تشک کف را تا انتها به طرف پایین فشار دهید.




- (۲) برای جمع نمودن صندلی، مطابق شکل ۲ با ایستادن در کنار و بوسیله‌ی بالا کشیدن لبه های تشک کف، صندلی را تا انتها جمع کنید.

ب) روش بستن زیرپایی:



- (۱) ابتدا صندلی چرخدار را روی زمین کاملاً باز نمایید.
(۲) دسته زیرپایی را مطابق شکل ۳ به داخل زیرپایی هل داده و نگهدارید.

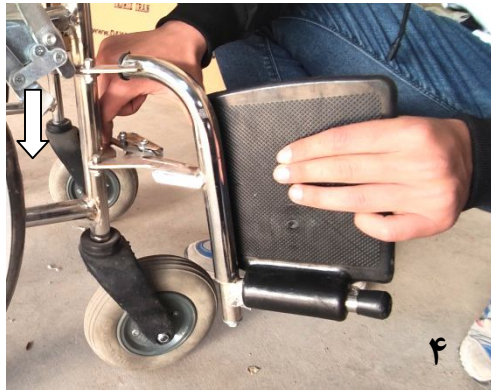

۳ مطابق شکل ۴ سوراخهای زیرپایی را از سمت خارج صندلی درون پینهای بالا و پایین روی بدنه قرار دهید. دقت نمایید زیرپایی مربوط به همان سمت صندلی باشد.

۴ زیرپایی را در حالتی که لولا شده مطابق شکل ۵ تا بسته شدن کامل دسته‌ی آن، به سمت داخل صندلی بچرخانید.



ج) روش باز کردن زیرپایی:



۱ ابتدا صندلی چرخدار را روی زمین کاملاً باز نمایید.
۲ دسته زیرپایی را مطابق شکل ۶ به داخل صندلی هل داده و نگهدارید.

۳ بوسیله‌ی دست دیگر زیرپایی را در حالتی که لولا شده مطابق شکل ۷ کمی به سمت خارج صندلی بچرخانید.



(۴) زیرپایی را به سمت بالا کشیده و آنرا خارج نمایید.


(د) **طریقه‌ی تنظیم ارتفاع زیرپایی:**



(۱) صندلی چرخدار را مطابق شکل ۸ به پشت بخواه‌باند.

(۲) بوسیله‌ی آچار مناسب مطابق شکل ۸ پیچ انتهایی زیرپایی

را عکس عقربه‌های ساعت بچرخانید تا کاملاً شل شود.

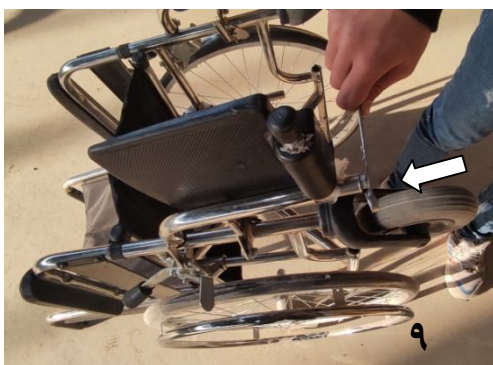

(۳) بوسیله آچار، همانند شکل ۹ چند ضربه به سر پیچ

انتهایی زیرپایی بزنید.

(۴) کفی زیرپایی را به سمت داخل صندلی چرخانده و با

حرکت آن در مسیر لوله‌ی ساق زیرپایی مطابق شکل ۱۰،

آنها در ارتفاع مناسب تنظیم نمایید.



(۵) با چرخاندن پیچ بوسیله‌ی آچار در جهت عقربه‌های


ساعت، زیرپایی را محکم نمایید.

(۶) زیرپایی طرف مقابل را نیز به همین طریق در ارتفاع

مناسب تنظیم نمایید. دقت نمایید هر دو کفی زیرپایی

کاملاً برابر کنار هم قرار گرفته باشند.

ه) نحوه باز کردن زیردستی:

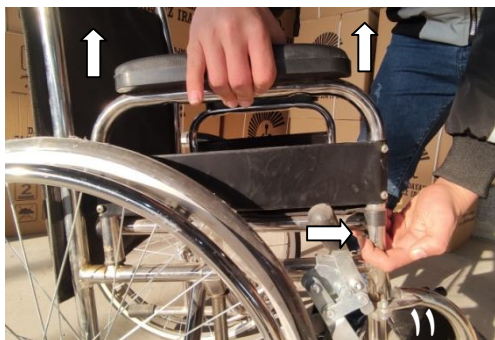

مطابق شکل ۱۱ بوسیله یک دست پین زیردستی را به داخل فشار داده و با دست دیگر زیردستی را به طرف بالا بکشید.

ه) نحوه جازدن زیردستی:



۱) قسمت پشت زیردستی را مطابق شکل ۱۲ کمی درون لوله قرار زیردستی نمایید، دقت نمایید طرف صحیح زیردستی را درون صندلی جا زده باشید.

۱) ابتدا بوسیله دست پین زیردستی را مطابق شکل ۱۲ به سمت داخل فشار دهید. این کار برای جلوگیری از زخمی شدن دست است.

۲) سپس سر پیندار زیردستی را درون لوله‌ی سوراخدار جلوی صندلی نمایید. دقت نمایید دست شما را گاز نگیرد.



۲) مطابق شکل ۱۳ به کمک دست زیردستی را به سمت پایین فشار دهید تا پین آن کاملاً جا خورده و از درون سوراخ بیرون آید.

ج) طریقه‌ی ثابت کردن صندلی چرخدار:



برای جلوگیری از حرکت صندلی، همانند شکل ۱۴ با هل دادن دسته‌ی هر دو ترمز به سمت جلوی صندلی بوسیله دست، صندلی در جای خود ثابت می‌شود و برای رها کردن صندلی، با کشیدن مجدد دسته‌ی ترمزها به عقب، صندلی چرخدار رها می‌شود. دقت نمایید این کار را روی هر دو ترمز انجام دهید.