

دستور استفاده از صندلی چرخدار مدل ۷۰۱۸:

الف) طریقه‌ی جمع و باز نمودن صندلی چرخدار:



(۱) برای باز نمودن صندلی، مطابق شکل ۱ با ایستادن در کنار و بوسیله‌ی دو دست، لبه کناری تشک کف را تا انتها به طرف پایین فشار دهید.




(۲) برای جمع نمودن صندلی، مطابق شکل ۲ با ایستادن در کنار و بوسیله‌ی بالا کشیدن لبه های تشک کف، صندلی را تا انتها جمع کنید.

ب) روش بستن زیرپایی:




(۱) ابتدا صندلی چرخدار را روی زمین کاملاً باز نمایید.
(۲) دسته زیرپایی را مطابق شکل ۳ به بیرون زیرپایی هل داده و نگهدارید.
(۳) مطابق شکل ۴ سوراخهای زیرپایی را درون پینهای بالا و پایین روی بدنه قرار دهید. دقت نمایید زیرپایی مربوط به همان سمت صندلی باشد.
(۴) زیرپایی را در حالتی که لولا شده مطابق شکل ۵ تا بسته شدن کامل دسته‌ی آن، به سمت داخل صندلی بچرخانید.

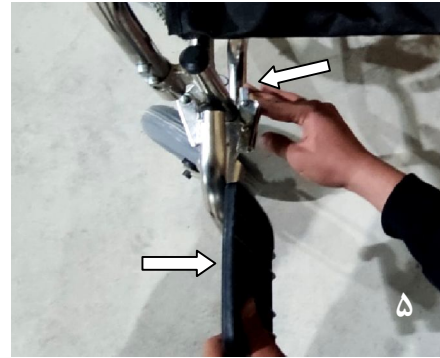

(ج) روش باز کردن زیرپایی:

- (۱) ابتدا صندلی چرخدار را روی زمین کاملاً باز نمایید.
- (۲) دسته زیرپایی را مطابق شکل ۶ به داخل صندلی هل داده و نگهدارید.
- (۳) بوسیله دست دیگر زیرپایی را در حالتی که لولا شده مطابق شکل ۷ کمی به سمت خارج صندلی بچرخانید.

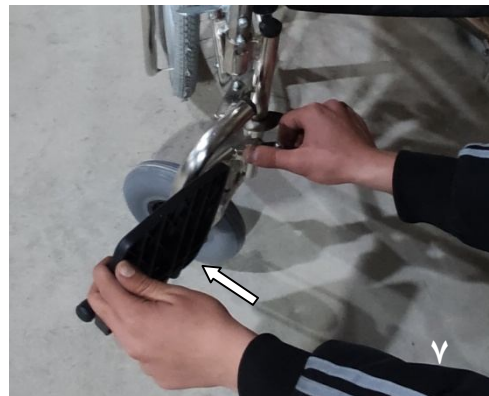

- (۴) زیرپایی را به سمت بالا کشیده و آنرا خارج نمایید.

(د) طریقه تنظیم ارتفاع زیرپایی:

- (۱) بوسیله آچار مناسب مطابق شکل ۸ پیچ انتهایی زیرپایی را عکس عقربه‌های ساعت بچرخانید تا کاملاً شل شود.
- (۲) بوسیله آچار، همانند شکل ۹ چند ضربه به سر پیچ انتهایی زیرپایی بزنید.



- ۳) کفی زیرپایی را به سمت داخل صندلی چرخانده و با حرکت آن در مسیر لوله‌ی ساق زیرپایی مطابق شکل ۱۰، آنرا در ارتفاع مناسب تنظیم نمایید.
- ۴) همانند شکل ۱۱ با چرخاندن پیچ بوسیله‌ی آچار در جهت عقربه‌های ساعت، زیرپایی را محکم نمایید.



- ۵) زیرپایی طرف مقابل را نیز به همین طریق در ارتفاع مناسب تنظیم نمایید. دقت نمایید هر دو کفی زیرپایی کاملاً برابر کنار هم قرار گرفته باشند.

ه) نحوه‌ی باز کردن زیردستی:

- مطابق شکل ۱۲ بوسیله‌ی یک دست پین زیردستی را به داخل فشار داده و با دست دیگر زیردستی را به طرف بالا بکشید.



و) نحوه‌ی جازدن زیردستی:

- ۱) قسمت پشت زیردستی را مطابق شکل ۱۳ کمی درون لوله قرار زیردستی واقع در پشت بدنه‌ی صندلی نمایید، دقت نمایید طرف صحیح زیردستی را درون صندلی جا زده باشید.
- ۲) بوسیله‌ی دست پین زیردستی را به سمت داخل فشار دهید.
- ۳) سر پیندار زیردستی را درون لوله‌ی سوراخدار جلوی صندلی نمایید.
- ۴) مطابق شکل ۱۳ به کمک دست، زیردستی را به سمت پایین فشار دهید تا پین آن کاملاً جا خورده و از درون سوراخ بیرون آید.



ی) طریقه‌ی ثابت کردن صندلی چرخدار:



برای جلوگیری از حرکت صندلی مطابق شکل ۱۴، با هل دادن دسته‌ی هر دو ترمز به سمت جلوی صندلی بوسیله‌ی دست، صندلی در جای خود ثابت می‌شود و برای رها کردن صندلی، با کشیدن مجدد دسته‌ی ترمزها به عقب، صندلی چرخدار رها می‌شود. دقت نمایید این کار را روی هر دو ترمز انجام دهید.

ر) روش باز و بسته کردن دسته‌شکن:

برای جادادن صندلی در محفظه‌های کوچکتر می‌توانید بوسیله یک دست با کشیدن پین پایین دسته‌های صندلی به سمت بیرون و خم کردن کامل دسته به سمت پشت صندلی توسط دست دیگر خود مطابق شکل ۱۵ و همچنین اعمال این کارها روی دسته‌ی دیگر صندلی ابعاد آن را کاهش دهید.



به منظور کاهش بیشتر ابعاد صندلی می‌توانید زیردستی‌ها و زیرپایی‌ها را نیز باز نمایید.

برای بستن دسته‌شکن، همانند شکل‌های ۱۶ و ۱۷ دوباره پین آن را توسط یک دست به بیرون بکشید و بوسیله‌ی دست دیگر خود، دسته صندلی را به سمت بالا بکشید تا پین درون سوراخ قرار گیرد.

